



Well_iD

Derma

The Wellness
ID Test







**Manual de
Bienvenida**

Powered by

 **ARQUIMEA**

Índice

- 2  **Well_iD**
- 4  **Well_iD Derma**
- 8  **¿Qué encontrarás dentro de Well_iD Derma?**
- 10  **¿Cómo funciona?**

Well_iD

Todo lo que tu ADN puede contarte sobre ti.

Well_iD te permite conocer tu identidad a través de aquello que te hace único: tu genética. Por medio de una muestra por raspado bucal secuenciamos tu ADN y localizamos los riesgos asociados a tu genética de padecer diferentes predisposiciones o alteraciones en tu salud.

Conocer tu identidad te permite actuar, mejorar y potenciar tu bienestar ya que nuestros hábitos de vida tienen la capacidad y el poder de modificar nuestra genética.

Beneficios, la genética al servicio de tu salud.

Conoce lo que tu cuerpo necesita:

Completa el diagnóstico de tu médico conociendo tu predisposición genética a ciertas alteraciones en tu salud para tratar de prolongar el tiempo hasta su manifestación o incluso evitar que aparezcan.

Adopta tratamientos personalizados:

Actúa en consecuencia modificando tus cuidados y rutinas con las recomendaciones personalizadas de tu médico, en base a las necesidades que nos revela tu genética.

Mejora tu estado de salud y calidad de vida:

Queremos hacerte partícipe de tu salud aumentando tu autoconocimiento. Una vez conocemos lo que tu cuerpo más necesita, promovemos un estilo de vida más saludable y un cuidado de la salud personalizado.

Sencilla prueba no invasiva:

Podrás tomarte la muestra tú mismo desde casa, nosotros nos encargamos del envío y la recogida de la muestra.

Well_iD Derma

Test genético para la piel.

Nuestros genes condicionan la manera en la que envejecemos.

Well_iD Derma te permite conocer los secretos de tu piel a través de tus genes. Desde tu predisposición genética a un envejecimiento prematuro hasta tu capacidad para mantener la piel hidratada, elástica y protegida frente al estrés oxidativo y la inflamación..

Cómodamente
desde casa

Resultados en
15-20 días

Transparencia
durante toda la experiencia Well_iD

Análisis y recomendaciones
personalizadas

Seguridad
ante todo

Well_iD Derma

Well_iD Derma analiza un total de 41 SNPs (polimorfismos de nucleótido único) relacionados con estos rasgos asociados a la salud y al envejecimiento de tu piel: hidratación, elasticidad, inflamación, pigmentación y fotoenvejecimiento, capacidad antioxidante y sudoración excesiva.

¿Qué analiza Well_iD Derma?



Hidratación



Elasticidad



Inflamación



**Pigmentación y
Fotoenvejecimiento:**

capacidad de bronceado,
sensibilidad solar, pecas y
manchas solares



Capacidad Antioxidante



Sudoración Excesiva

**¿Qué
encontrarás
dentro de tu
kit Well_iD
Derma?**





**Manual de
Bienvenida
Well_iD**



**Toallita de manos
desinfectante.**



**Dos hisopos bucales
en tubo para la
recogida de muestra.**



**Pegatinas
identificativas de la
muestra.**



**Bolsa para el envío
de la muestra.**



**Sobre para envío por
transportista.**

¿Cómo funciona?

IMPORTANTE: Por favor, asegúrate de seguir todos los pasos antes de enviar la muestra.

Pega aquí la pegatina identificativa de tu kit.

La pegatina con el siguiente dibujo:



¿Cómo funciona?



Registra tu test en wellidtest.com

- Accede a tu espacio personal **My Well_ID**
- Rellena tus datos personales e introduce el código identificador de tu kit.
- Lee atentamente y acepta el consentimiento informado.

**No se analizarán las muestras de los test que no hayan sido registrados, ni aquellas en las que no se encuentre el consentimiento informado firmado.*

¿Cómo funciona?

2_

Solicita la recogida de la muestra.

Llama al teléfono **911 518 005** para concretar la fecha y hora de recogida de la muestra.

Un mensajero lo recogerá en la dirección que nos indiques y la llevará a nuestros laboratorios para que nuestros expertos en diagnóstico genético analicen tu ADN.

IMPORTANTE: Antes de tomarte la muestra concreta la recogida con la mensajería. De esta forma, podrás tomarte la muestra el mismo día que se envía a laboratorio.

¿Cómo funciona?



Tómate la muestra.

Evita comer, beber, fumar o lavarte los dientes **una hora antes de tomarte la muestra.**

Se recomienda hacerlo a primera hora de la mañana, en ayunas.

¿Cómo funciona?

Tómate la muestra.

Antes de tomar la muestra



Lávate las manos con agua y jabón o, en su defecto, utiliza la toallita de manos desinfectante.



Si otra persona te ayuda a tomar la muestra deberá utilizar guantes clínicos para no contaminar la muestra con su ADN.

Proceso de la toma



- 1_ Abre el tubo que contiene el hisopo y cógelo por el tapón.

IMPORTANTE: *no toques la punta de algodón y evita que toque cualquier superficie.*



- 2_ Frota fuerte la punta de algodón contra el interior de las paredes de la boca (por ambos lados) durante 1 minuto.

¿Cómo funciona?

Tómate la muestra.



- 3_ Introduce inmediatamente el hisopo en su tubo contenedor, ciérralo y coloca la pegatina identificativa que contiene el siguiente dibujo.



IMPORTANTE: evita que se contamine tocando cualquier superficie.



- 4_ Repite el proceso con el segundo hisopo.



- 5_ Introduce los 2 tubos en la bolsa para el transporte de muestra.

IMPORTANTE: las pegatinas identificativas deben ir pegadas una en cada tubo.



- 6_ Introduce la bolsa médica, con las dos muestras, en el sobre de envío de la mensajería.

¿Cómo funciona?



Recibe tus resultados genéticos.

En tan solo **2-3 semanas** desde la recogida de la muestra conocerás tu identidad genética.

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
Podrás consultar y descargar tus resultado en tu espacio personal My Well_iD.

¿Cómo funciona?




Consulta a tu médico para recibir un tratamiento y recomendaciones personalizadas.

Acude a la consulta de tu médico estético o dermatólogo con tu informe de resultados para recibir un diagnóstico integral de tu piel y un asesoramiento personalizado con las pautas y tratamientos más indicados para ti.



**Conoce tu
interior,
potencia tu
bienestar.**



wellidtest.com



well_id_test



Well iD

info@wellidtest.com

Powered by

 **ARQUIMEA**

ARQUIMEA Medical
Margarita salas, 10
28918, Leganés, Madrid
(Spain)

